



# BeGraft

peripheral



# BeGraft

## peripheral


Este sistema de endoprótese periférica se destaca com uma alta força radial, mantendo ao mesmo tempo extraordinária flexibilidade e baixo perfil. A plataforma de cromo-cobalto da endoprótese é coberta com uma membrana microporosa de ePTFE.



**Menos trauma,  
procedimentos mais rápidos**  
através de baixo perfil  
(compatibilidade 6 F até 8 mm)




**Extraordinário acesso à lesão**  
através de uma flexibilidade excepcional

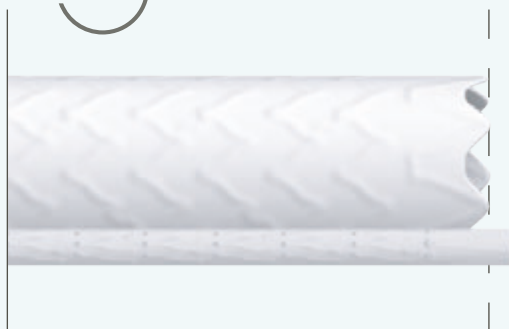


**Comportamento previsível da endoprótese**  
através de baixo encurtamento &  
alta força radial

A segunda geração, incluindo as modificações no design, foi lançada em outubro de 2015

1. A cobertura de ePTFE agora é fixada por dentro em ambas as extremidades do stent para eliminar o risco de descolamento do material recoberto (por exemplo, ao usar uma bainha introdutora muito pequena).

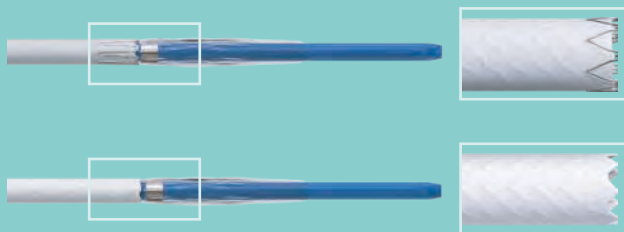

2. A largura do conector foi aumentada em aprox. 20% para melhorar a rigidez longitudinal da endoprótese.

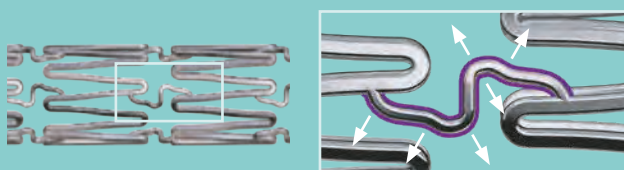

3. A espessura da cobertura de ePTFE foi aumentada para melhorar a estabilidade mecânica.



Espessura Inicial (100µm)

Espessura Modificada (200µm)

Estas modificações de design não afetam negativamente as vantagens em relação ao perfil (6 F até 8 mm), à flexibilidade, à navegabilidade e o encurtamento e nem comprometem a segurança e eficácia do design para o uso pretendido (indicações).

## Especificações do produto

Material de Revestimento	Tubo ePTFE Microporoso (203 ± 25µm)
Material do Stent	CoCr (L605)
Projeto da Endoprótese	Stent Único
Dimensões do Suporte (Largura x Espessura)	0,135 x 0,145 mm (SV) 0,145 x 0,145 mm (MV) 0,165 x 0,145 mm (LV)
Sistema de Entrega	OTW
Compatibilidade com Introdutor	6F até Ø 8 x 57 mm 7F
Fio-Guia	0,035"
Perfil do Cateter	5F
Material Marcador do Balão	Platina / Irídio
Pressão Nominal	9 bar Ø 5 - 7 mm 8 bar Ø 8 - 10 mm
Pressão de Ruptura	13 bar Ø 5 - 7 mm 12 bar Ø 8 - 10 mm
Comprimento do Cateter de Entrega	120 cm
Diâmetro Expandido da Endoprótese	5, 6 mm (SV) 7, 8 mm (MV) 9, 10 mm (LV)
Comprimento Nominal da Endoprótese	18, 22, 28, 38, 58 mm (SV) 18, 23, 27, 37, 57 mm (MV) 27, 37, 57 mm (LV)
Validade	Máx. 3 anos

SV= Vaso Pequeno, MV= Vaso Médio, LV= Vaso Grande



## Indicações

O Sistema de Endoprótese Periférica BeGraft é indicado para tratamento intraluminal em artérias Ilíacas e Renais para:

- Restauração e melhora da patência
- Tratamento de aneurismas, perfurações agudas, rupturas agudas e fístulas

## Informações para pedidos

Diâmetro da Endoprótese Expandida	Comprimento Nominal da Endoprótese	Introdutor Compatível	Referências	
			75 cm	120 cm
5 mm	18 mm	6 F	BGP1805_1	BGP1805_2
	22 mm		BGP2205_1	BGP2205_2
	28 mm		BGP2805_1	BGP2805_2
	38 mm		BGP3805_1	BGP3805_2
	58 mm		BGP5805_1	BGP5805_2
6 mm	18 mm	6 F	BGP1806_1	BGP1806_2
	22 mm		BGP2206_1	BGP2206_2
	28 mm		BGP2806_1	BGP2806_2
	38 mm		BGP3806_1	BGP3806_2
	58 mm		BGP5806_1	BGP5806_2
7 mm	18 mm	6 F	BGP1807_1	BGP1807_2
	23 mm		BGP2307_1	BGP2307_2
	27 mm		BGP2707_1	BGP2707_2
	37 mm		BGP3707_1	BGP3707_2
	57 mm		BGP5707_1	BGP5707_2
8 mm	27 mm	6 F	BGP2708_1	BGP2708_2
	37 mm		BGP3708_1	BGP3708_2
	57 mm		BGP5708_1	BGP5708_2
9 mm	27 mm	7 F	BGP2709_1	BGP2709_2
	37 mm		BGP3709_1	BGP3709_2
	57 mm		BGP5709_1	BGP5709_2
10 mm	27 mm	7 F	BGP2710_1	BGP2710_2
	37 mm		BGP3710_1	BGP3710_2
	57 mm		BGP5710_1	BGP5710_2

Registro ANVISA: 80583400003

### Be (ser) inovador

Nós nos concentramos no desenvolvimento de produtos exclusivos e nos esforçamos para encontrar respostas criativas para as questões colocadas pelo setor de saúde.

### Be (ser) dedicado

A atenção especial ao cliente e a conformidade com normas internacionais nos ajudam a manter uma qualidade insuperável em produtos e serviços.

### Be (ser) responsável

Nós nos importamos em oferecer uma saúde melhor, e em cuidar do nosso sistema e meio ambiente. Todos os membros da nossa equipe estão motivados a fazer uma contribuição vital para a qualidade de vida.

### Be (ser) efetivo

Buscamos soluções eficientes, em termos de tempo e custo, para atender as diferentes necessidades dos nossos clientes e pacientes em todo o mundo.

Distribuído por:

**ENDOTEC**  
MEDICAL

Rua Sampaio Viana, 202 - 6º andar - Cj. 61-65 - Paraíso  
CEP 04004-000 - São Paulo - SP - Brasil  
Fone: (11) 3884-8102  
Informações Técnicas: [endotec@endotecmed.com.br](mailto:endotec@endotecmed.com.br)  
[www.endotecmed.com.br](http://www.endotecmed.com.br)

Fabricado por:

**Bentley**

© 2019 Bentley InnoMed GmbH | Alemanha  
Todos os Direitos Reservados  
Art.-Nr. 401808-001/005